

Ingemar - Penispump

Användarmanual

Best Friend
moments



Det finns omkring 355 000 svenska män med både högt blodtryck och problem med sin potens som inte får någon behandling för sina erektionsproblem. Man är tyst och ingen guidar till den ofta enkla hjälp som finns att få.

Penisringar och penispumpar hör ihop. Kontakta oss på Belladot för mer info.



TIPS!
Tvätta din
Belladotprodukt med
Cleansing gel som
både rengör och
återfuktar gummit.
Då håller den längre.



TIPS!
Använd alltid
Belladot glidmedel,
för en skönare känsla.

Om Ingemar

Belladot Ingemar är en kraftfull erektionspump med hög kapacitet. Kan användas både för njutning och som hjälpmedel för att få en starkare erektion. Handtaget är greppvänligt och lätt att pumpa med. Cylinderns mjuka gummiring håller tätt och bildar ett sugande vakuum. Du kan enkelt jämföra resultatet på mätskalan. Lättillgänglig ventil för att snabbt och lätt kunna släppa på trycket.

Ingemar pumpar blod till svällkropparna i penis med hjälp av vakuum. Ingemar används vid svårighet att få erektion eller om mer blodfyllnad önskas i penis för en kraftigare erektion. Efter att erektion uppnåtts bör en penisring (även kallad potensring) användas för att hålla kvar blodet i penis.

Vakuumpumpar är mycket effektiva och ofta ett bortglömt hjälpmedel. Metoden är enkel, helt ofarlig, och fungerar bra vid de flesta erektionsstörningar.

Erektionsproblem drabbar nästan alla män någon gång i livet, kanske bara under en kortare period, och försvinner då oftast av sig själv. Erektionsproblem kan även orsakas av någon sjukdom, t ex hjärt- och kärlsjukdom. Så om problemet kommit smygande och varat en längre tid (mer än ett halvår) bör du vända dig till läkare för en hälsoundersökning.

Man räknar med att ca var femte man i Sverige lider av erektionsstörningar. Som alternativ till medicinsk erektionsbehandling kan en penispump kompensera den uteblivna erektionen.

Den används ofta i kombination med en penisring (potensring) som gör att blodet stannar kvar i penis och erektionen behålls.

Hur man använder Ingemar

Först placerar du penis i den mjuka gummiringen. Använd en liten droppe glidmedel på penis och på gummiringen, så känns det behagligare. Därefter ser du till att det sluter tätt mellan blygdbenet och pumpen. Nu kan du börja pumpa försiktigt med handtaget. Pumpa till önskvärd effekt och storlek, men ta det lite försiktigt i början. Du släpper sedan trycket genom att trycka in knappventilen i pumpens övre del. Nu har du fått blod i svällkropparna och har en erigerad penis.

Du kan behöva trä på en potensring direkt efter användandet av penispumpen för att hålla kvar blodet i penis och förlänga erektionen. En potensring medföljer Ingemar. Vill du ha fler rekommenderar vi Viktor penisringar. Du kan då sätta flera ringar, en eller två vid penisroten och en vid ollonkanten. Kondom gör att ringarna hålls på plats.

Vill du ha en kraftigare potensring med vibration samt kula för stimulans av pungen (eller av kvinnans klitoris om ringen vänds åt andra hållet) rekommenderar vi Bertil penisring vibrator.

Rekommenderad tid för användning av ringarna är max 30 minuter. De ska genast avlägsnas vid obehagskänsla.

Dessa hjälpmedel kan användas även om man bara önskar en större och fylligare erektion och behöver inte alls vara förknippade med nedsatt förmåga.

Mer info finns på www.belladot.com/sexologsvarar/

Fråga gärna din apotekspersonal, läkare eller gynekolog för mer information, eller kontakta vår sexolog på sexolog@belladot.com.



Kontakta oss
för ytterligare frågor:
info@belladot.com
031-653300

belladot